

Broncalt®

A BASE DI ACQUA TERMALE SALSOBROMIODICA

Le acque termali salsobromoiodiche appartengono al gruppo delle acque salse, nella varietà salsobromoiodica per la presenza di bromo e iodio.

Sono acque ipertoniche, fredde, estratte da pozzi a una densità di 16 gradi Baumé (1 grado Baumé corrisponde a circa 11 grammi di sale per litro), con una concentrazione di cloruro di sodio superiore al 10%.

Indicazioni

È un dispositivo medico indicato per il trattamento dei sintomi legati a raffreddamento, rinite, sinusite, bronchite e a flogosi delle vie aeree. L'Acqua termale salsobromoiodica favorisce la modulazione della secrezione e della componente sierosa del muco, stimolando il trofismo della mucosa e la riduzione dell'edema locale.

L'Acido ialuronico favorisce la riparazione e la rigenerazione della mucosa con la formazione di un film, microbiologicamente controllato dalla presenza dell'Estratto di semi di pompelmo, che svolge azione protettiva e idratante, prevenendo le irritazioni e riequilibrando le secrezioni mucose.

Composizione

Acqua termale salsobromoiodica, Glicerina, Estratto di semi di pompelmo, Acido ialuronico, Sucralosio, Sodio cloruro, Acqua depurata.

Confezioni

10 flaconcini da 5 ml.

Modalità d'uso

Nebulizzare tramite aerosol 1-2 flaconcini al dì. Il prodotto può essere nebulizzato tal quale oppure utilizzato come soluzione base. In alternativa, 1-2 flaconcini al giorno da suddividere nelle due narici, dopo aver soffiato delicatamente il naso.

Flaconcini richiudibili, utilizzare il contenuto entro 24 ore dall'apertura. Dopo l'apertura conservare in frigorifero.

Utilizzo mediante nebulizzatore:

- utilizzare esclusivamente apparecchi pneumatici
- versare il contenuto di un flaconcino nell'ampolla. Utilizzare tal quale oppure come base diluente per altri principi attivi
- scegliere l'accessorio preferibile da applicare al nebulizzatore (boccaglio, mascherina, forcina o doccia nasale)

- azionare l'apparecchio e non sospendere l'erogazione finché è presente soluzione nell'ampolla

Per i lavaggi nasali:

- aprire il flaconcino girando la chiusura a farfalla
- reclinare indietro la testa e introdurre delicatamente l'apertura del flaconcino appena dentro la narice
- premere il flaconcino fino a far fuoriuscire la quantità di liquido desiderata
- ripetere l'operazione con l'altra narice
- rialzare la testa e asciugare delicatamente il liquido in eccesso
- lasciar trascorrere alcuni minuti prima di soffiare il naso per permettere alla soluzione di agire
- eventualmente richiudere il flaconcino introducendo la punta della farfalla nel foro superiore

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti.

Avvertenze

Non superare le dosi consigliate, in caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico, tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini, utilizzare entro la data di scadenza indicata sull'imballo, la presenza di sostanze naturali può far variare le caratteristiche organolettiche del prodotto senza che ciò ne comprometta la qualità.

Conservare il prodotto al riparo dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

Non utilizzare i flaconcini se risultano parzialmente aperti o danneggiati.

Segnalare al medico o al farmacista ogni effetto indesiderato.

In caso di incidente grave, avvisare immediatamente il Fabbricante e le autorità competenti (Ministero della Salute ed Ente Notificato).

Dispositivo medico



 **Fabbricante:**

 **Nekkar Lab**

Nekkar Lab S.r.l.

Via Padre Giovanni Battista Martini, 4
20131 Milano (MI) – Italia

 **AURORA**
biofarma

Distributore:

Aurora Biofarma S.r.l.

Via Porpora, 127
20131 Milano (MI) – Italia
info@aurorabiofarma.it
www.aurorabiofarma.it

Stabilimento di produzione:

Farcoderma S.r.l.

Via Soncino, 9
24050 Torre Pallavicina (BG) - Italia

Titolare del marchio:

Aurora Licensing S.n.c.

Via Del Milliaro, 32
40133 Bologna (BO) – Italia