


Packaging.	NOME			REV.	COD.	CLIENTE
Fogl.	2FIRENS_MOD_cambio indirizzo fabbricante_16-10-2020			REV/DEL 16/10/2020	2FIRENS	Farcoderma
Dimensione Aperto		Dimensione Chiuso	N° colori	1	nero	/
150X200 mm		150X50 mm	/	/	/	/
Stampa Fronte	si	Stampa Fronte/Retro	NO	Note		
Piega incrociata	NO					

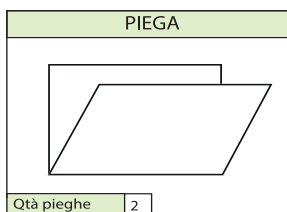

**ATTENZIONE:** L'approvazione del presente file grafico sottintende un CONTROLLO da parte vostra della bozza IN OGNI SUA PARTE.  
**OVVERO:** Ingredienti, grafica, riserve, lotti, codici e disposizione dei vari elementi in funzione del confezionamento del prodotto.  
**N.B.** PRINTINGPACK non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori rilevati sul prodotto finito non segnalati sulla presente bozza.

# REFLUXSAN® Nipio

## sciropo antireflusso ad uso pediatrico con siringa dosatrice

### Indicazioni

È un dispositivo medico ad uso orale che, grazie alla sua azione meccanica, è indicato per la riduzione dei sintomi correlati al reflusso gastroesofageo e all'esofagite. L'utilizzo del prodotto permette di limitare le sensazioni di bruciore (pirosi), rigurgito, difficoltà a deglutire (disfagia), deglutizione dolorosa (odinofagia), tosse, disfonia.

### Composizione

Magnesio Alginato, Gomma Xantana, Sucralosio, p-ossibenzoato di metile sodico, p-ossibenzoato di propile sodico, Acqua Depurata.

### Confezione

Flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

### Modalità d'uso


Agitare prima dell'uso.

Somministrare secondo le dosi riportate nella tabella sottostante o secondo parere medico:

Età	Peso in kg	Posologia
Neonati	≤ 5	1 ml, 5-10 minuti dopo la poppata. In caso di rigurgito dopo la somministrazione, somministrare 1 ml aggiuntivo
Fino a 3 anni	6 -15	4 ml dopo i pasti e prima di coricarsi

### Istruzioni per l'uso della siringa dosatrice

1. svitare il tappo spingendolo verso il basso e ruotandolo in senso antiorario;
2. introdurre a fondo la punta della siringa nel foro del sottotappo;
3. capovolgere il flacone, quindi, tenendo saldamente la siringa, tirare delicatamente lo stantuffo verso il basso facendo defluire lo sciroppo nella siringa fino alla tacca corrispondente alla dose desiderata;
4. rimettere il flacone in posizione verticale e rimuovere la siringa ruotandola delicatamente;
5. introdurre la punta della siringa nella bocca del bambino ed esercitare una lieve pressione sullo stantuffo per far defluire lo sciroppo.

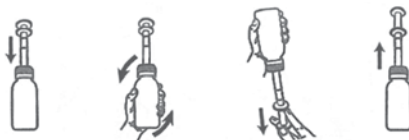

### Controindicazioni

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti.

### Avvertenze

Non superare le dosi consigliate, in caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico, tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini, utilizzare entro la data di scadenza indicata sull'imballo, il prodotto può presentarsi più o meno viscoso, senza che ciò ne comprometta la qualità, la presenza di sostanze naturali può far variare le caratteristiche organolettiche del prodotto (odore, colore, sapore) senza che ciò ne comprometta la qualità. Conservare il prodotto a temperatura di 4-30° C.

**Non contiene glutine, OGM e lattosio.**



Fabbricante  
Pharcomed S.r.l. - Via di Ricorboli, 17 - 50126 Firenze - Italia

Distributore

Aurora Biofarma S.r.l. - Via Porpora, 127 - 20131 Milano (MI) - Italia

Dispositivo medico



1370

Rev. 7 del 16/10/2020

# REFLUXSAN® Nipio

## sciropo antireflusso ad uso pediatrico con siringa dosatrice

### Indicazioni

È un dispositivo medico ad uso orale che, grazie alla sua azione meccanica, è indicato per la riduzione dei sintomi correlati al reflusso gastroesofageo e all'esofagite. L'utilizzo del prodotto permette di limitare le sensazioni di bruciore (pirosi), rigurgito, difficoltà a deglutire (disfagia), deglutizione dolorosa (odinofagia), tosse, disfonia.